

Alstublieft, de mestkit voor het mestonderzoek van uw paard

1 Schrijf op het label van de plastic zak de naam van het paard, de naam van de eigenaar en de datum waarop je het monster hebt genomen.

2 Pak met de handschoenen 1 á 2 ballen verse mest die NIET met de grond in aanraking zijn geweest.

3 Doe de mestballen in de plastic zak met label *en druk deze een klein beetje plat.*

4 Doe de handschoenen uit en stop de plastic zak met het monster in de gripzak en doe het absorptiemateriaal er bij.

5 Bewaar het monster koel tot het moment van afleveren. Lever het monster zo snel mogelijk in.

6 Vul de vragenlijst zo compleet mogelijk in en doe deze in de gripzak. Zie de achterkant van deze instructie voor de vragenlijst.

7 Doe de plastic zak samen met het absorptiemateriaal tussen de kartonnen bescherming en doe deze in de gripzak.

9 Lever het monster zo snel mogelijk in bij HippoSupport. Controleer voor het afleveren op onze website onze openingstijden op vakanties en feestdagen. Je kunt gebruik maken van de speciale aflverebox voor het geval wij er niet zijn.

A Het mestonderzoek van HippoSupport is gericht op gezonde paarden. Heb je het vermoeden dat je paard niet gezond is? Neem dan contact op met je dierenarts.

B Het mestonderzoek van HippoSupport is voornamelijk gericht op het vaststellen van worminfecties van de (grote/kleine) bloedworm, spoelworm, veulenworm. De lintworm scheidt onregelmatig eitjes uit en daardoor is mestonderzoek onvoldoende betrouwbaar. Longworm, aarsworm en leverbot kunnen in principe niet (betrouwbaar) met mestonderzoek gevonden worden. Als deze worden gevonden, wordt dit wel gerapporteerd.

C Houd er bij het opsturen van het monster rekening mee dat de laatst toegediende wormkuur minimaal 8 weken geleden is. (Tenzij het om het vaststellen van de effectiviteit van de kuur gaat.)

D Heb je vragen? Bekijk dan onze website www.paardenmestonderzoek.com/faq voor de meestgestelde vragen, of neem contact met ons op: info@hipposupport.nl of 0578-661376.

Met vriendelijke groet,

Suzanne Bijl & Richard Verbree
HippoSupport Mestonderzoek
www.hipposupport.nl | www.paardenmestonderzoek.com

Inhoud van de mestkit

- Vragenlijst (z.o.z.)
- Plastic zakje met label
- Gripzak
- Handschoenen
- Absorptiemateriaal
- Reminders sticker voor het volgende mestonderzoek